



## بالابر بیمار

بکس از تکانی هایی که همواره مشترکان با آن مواجهند، جابه جایی و انتقال بیمار می باشد. در بیماری موارد به دلیل کمکت سن، مشکلات حرکتی و وزن بالا، احتمال آسیب دیدگی در جابجایی بالا است. در این گونه موارد فشار زیادی به همراه وارد می شود که پیشنهاد ما استفاده از دستگاه بالابر بیمار است..


## ۱- مقدمه

خرید دستگاه لیفت بیمار را به شما تبریک می‌گوییم. این دستگاه این امکان را به شما می‌دهد که بیمار را بدون زحمت بلند کرده و جا به جا کنید.

این دفترچه راهنمای شامل نکات ایمنی، طریقه نصب و استفاده از دستگاه می‌باشد. لذا از شما خواهشمندیم این دفترچه را قبل از استفاده از این محصول مطالعه فرمایید.


## ۲- نکات ایمنی

۱. قبل از جا به جا کردن بیمار با دستگاه ابتدا جهت آشنایی با عملکرد دستگاه تمرین کرده و به بیمار نیز درباره آن توضیح دهید.
۲. از ظرفیت قابل حمل دستگاه تجاوز نکنید.
۳. این دستگاه برای جا به جای فواصل کوتاه مانند انتقال از ویلچر به تخت و... می‌باشد. از این دستگاه برای جایی مستمر و طولانی استفاده نکنید.
۴. در هنگام بالا کشیدن بیمار توسط دستگاه لیفت حتی الامکان پایه باز شو را در عریض ترین حالت خود قرار دهید.
۵. در هنگام حرکت با دستگاه پایه باز شو را ببندید.
۶. در هنگام بلند کردن بیمار سعی شود بیمار در مرکز پایه دستگاه قرار بگیرد.
۷. دستگاه وقتی به برق متصل است، جک دستگاه حرکت نمی‌کند.


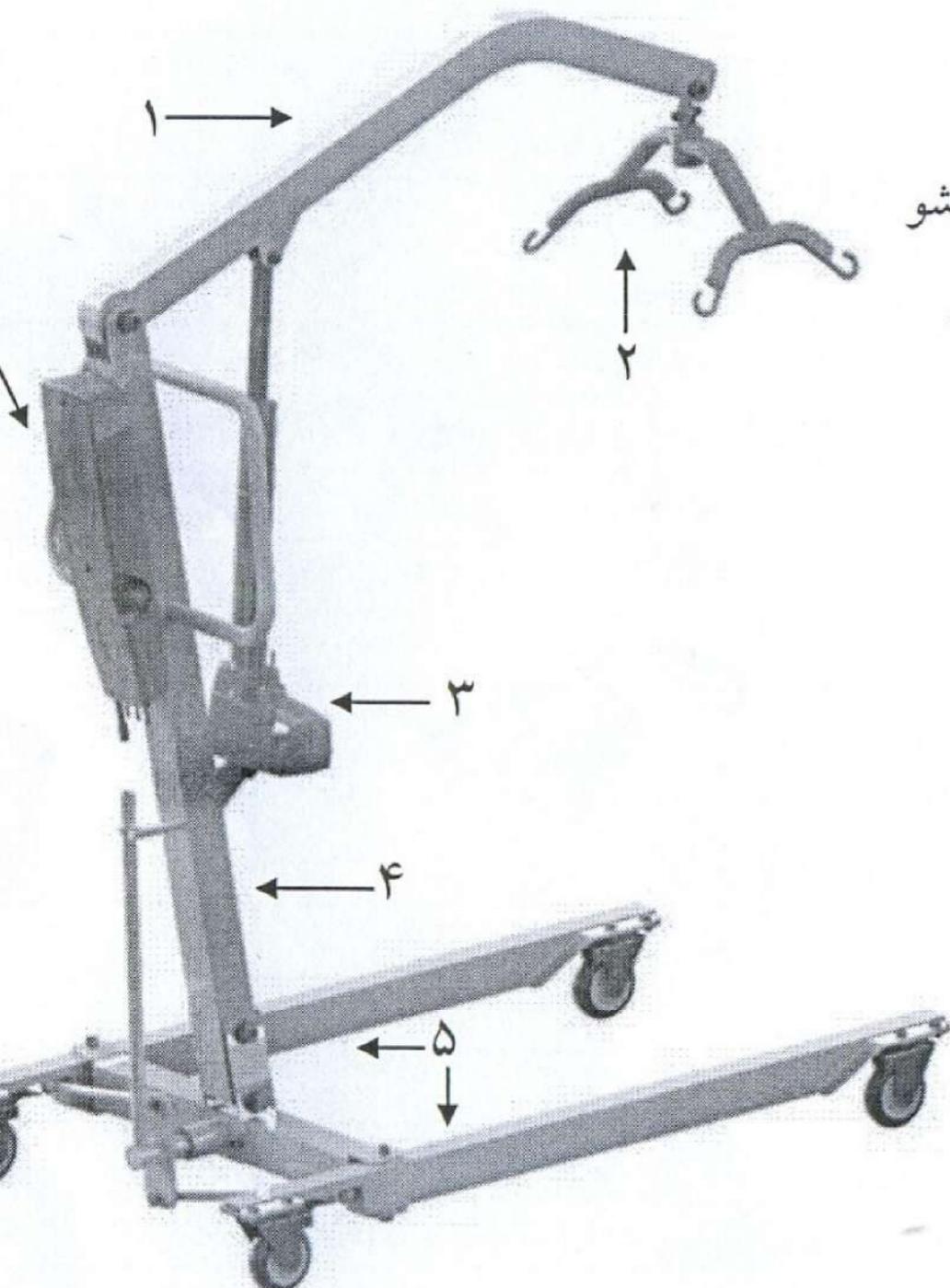


تعداد	شرح	شماره شکل
۱	پایه بازشو راست	۱
۱	پایه ستون	۳
۱	مجموعه ستون	۴
۱	مجموعه ی بازوی افقی	۵
۱	محل بلبرینگ	۶
۲	بلبرینگ	۷
۱	ورق و شفت فرمان	۸
۲	سر سیبیک	۹
۲	سیبیک	۱۰
۲	میله سیبیک	۱۱
۱	میله فرمان	۱۲
۱	قطعه آویز ۱	۱۳
۱	قطعه آویز ۲	۱۴
۱	بلبرینگ	۱۵
۲	خار	۱۶
۱	چهار شاخ آویز	۱۷
۲	بلبرینگ غلتکی	۱۹
۸	واشر پلاستیکی	۲۰
۱	جک	۲۱
۱	کنترل باکس	۲۲
۴	چرخ	۲۳
۱	واشر پلاستیک ۰.۱ میلیمتر	۲۴
۱	گیره فنری میله فرمان	۲۵
۴	واشر پلاستیکی ۵ میلیمتر	۲۶

## ۴- نقشه انفجاری

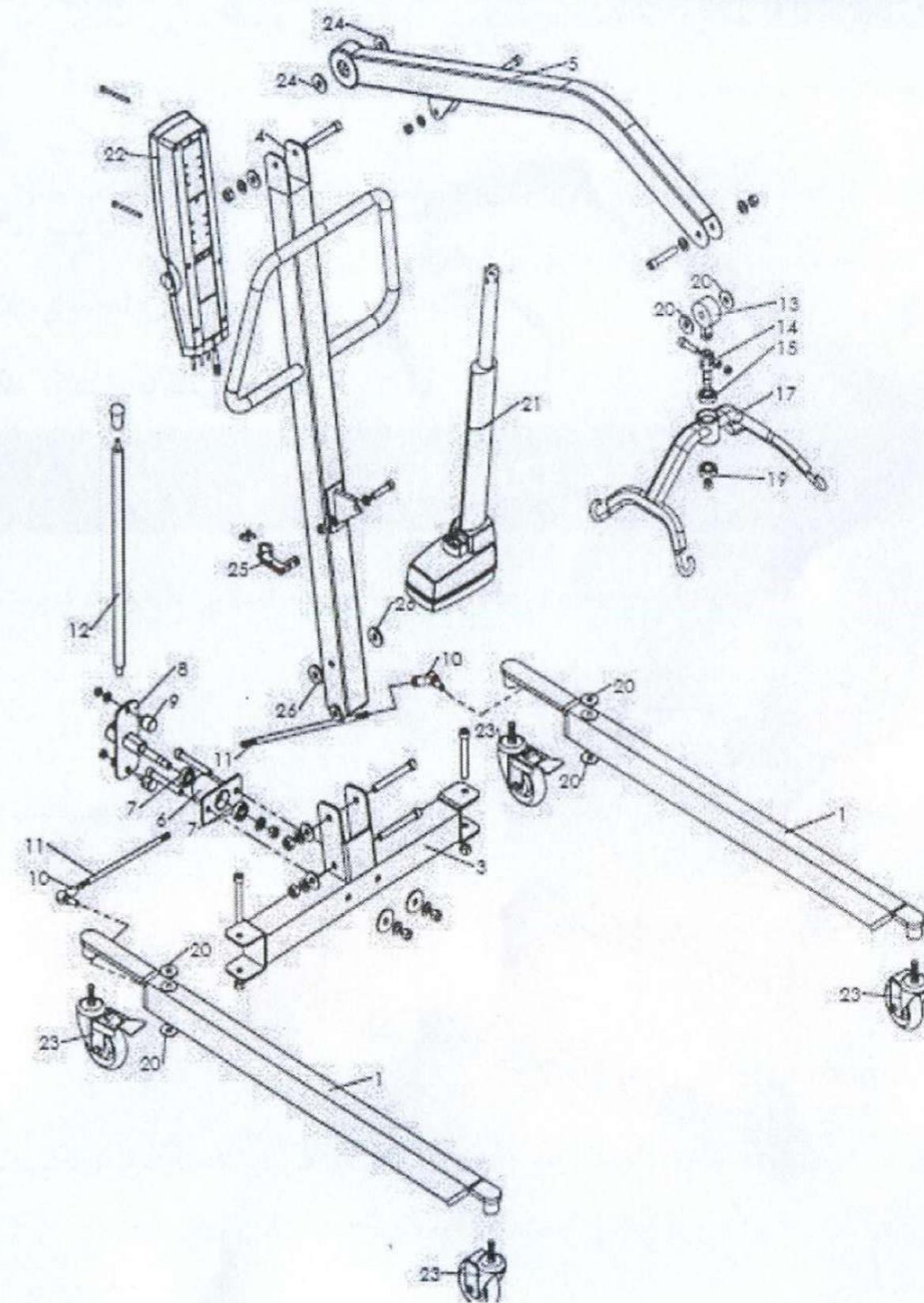


۱- مجموعه ستون را از محل لولا بچرخانید، در محل خود قرار داده و سپس پیچ، واشرها و مهره مربوطه را در جای خود محکم کنید.

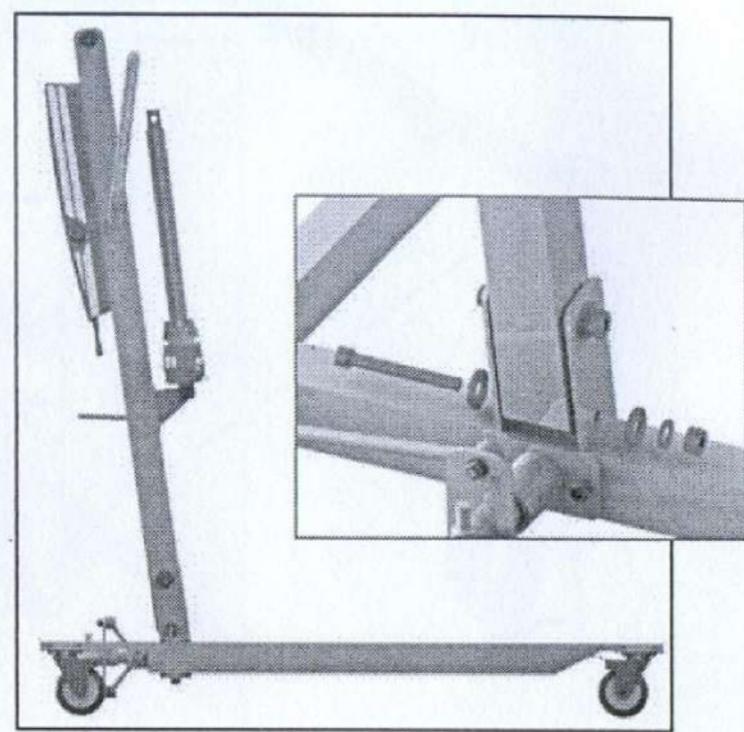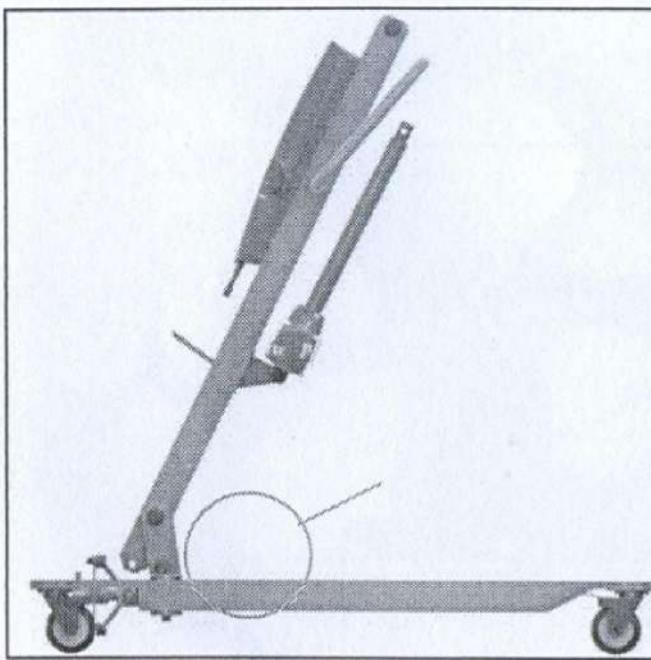


## ۵- طریقه نصب


جهت سهولت در حمل ، دستگاه در یک جعبه بسته بندی می شود. آنچه در جعبه به شما تحویل داده می شود در تصویر زیر مشخص شده است. جهت استفاده از دستگاه مصرف کننده مستلزم یادگیری چگونگی مونتاژ ثانویه دستگاه می باشد لذا مراحل مونتاژ را با دقت انجام دهید.

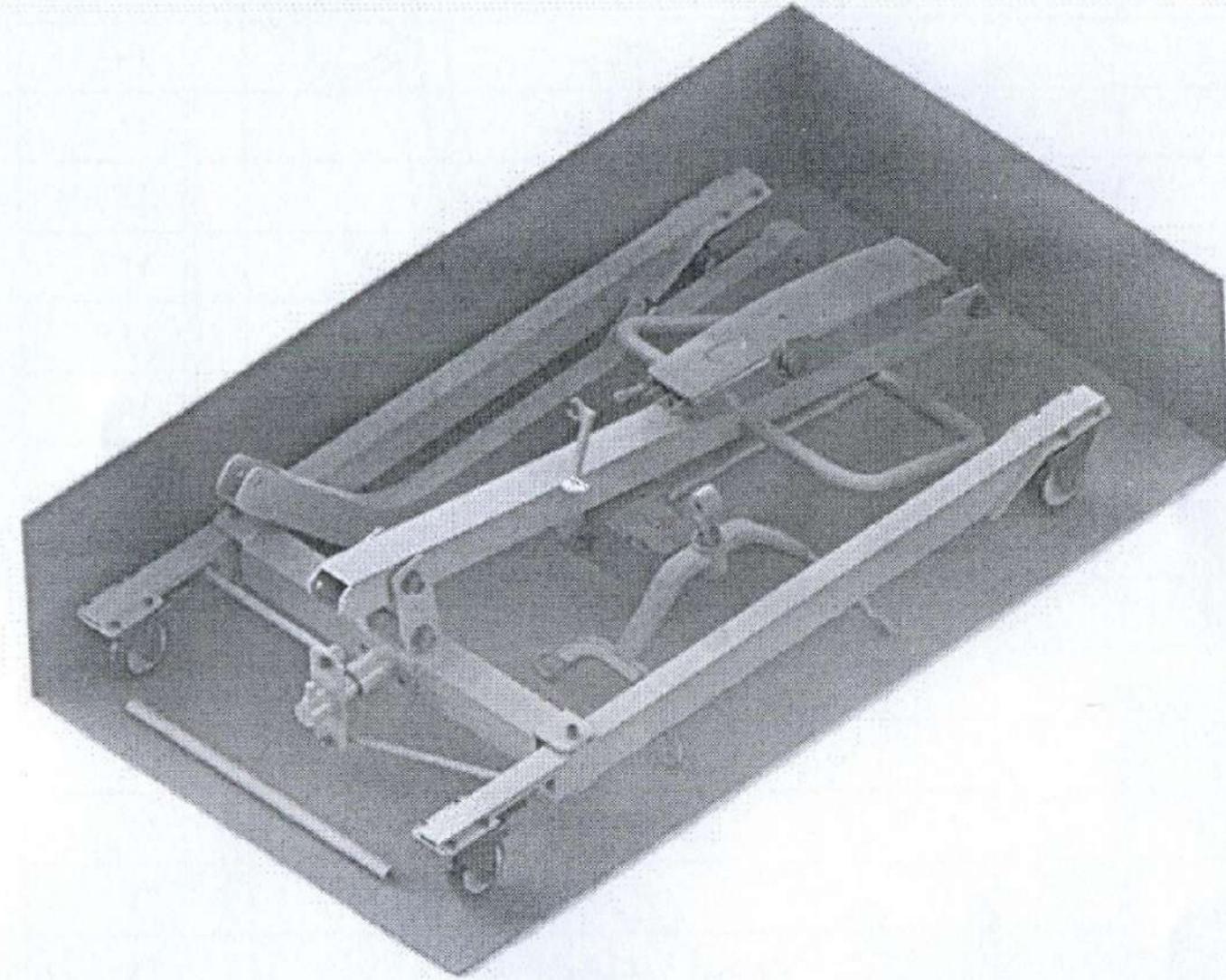


۴- آویز جلیقه را با توجه به تصویر زیر در محل خود قرار دهید و توسط پیچ و مهره و واشرها محکم کنید. (واشر های پلاستیکی را فراموش نکنید.)

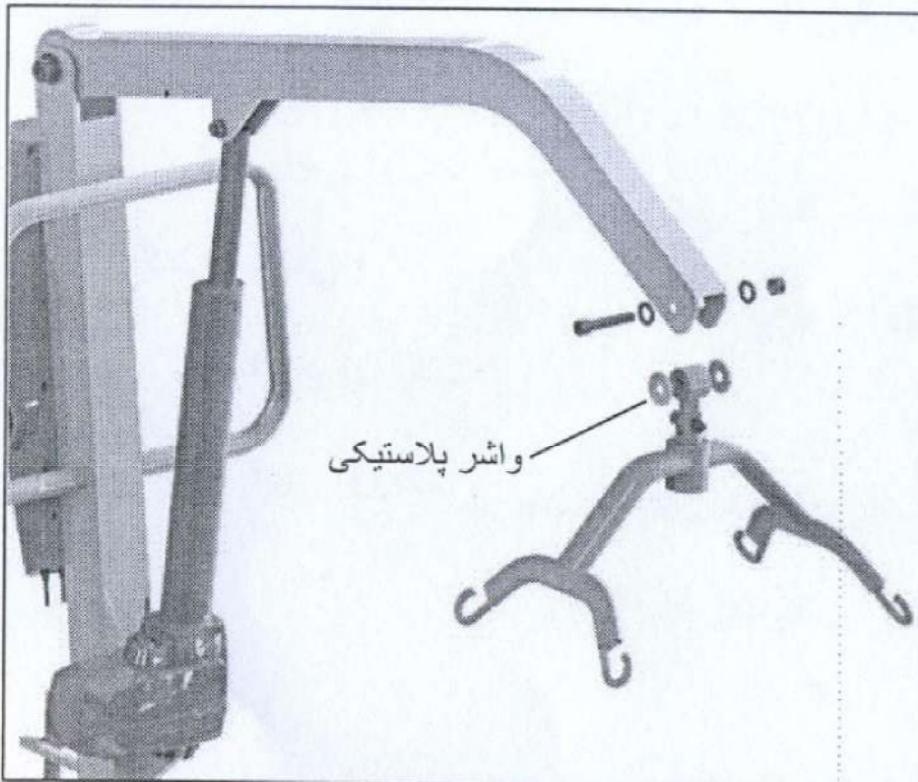

۲- بازو افقی را در محل خود قرار داده و توسط پیچ ، واشرها و مهره در جای خود محکم کنید.

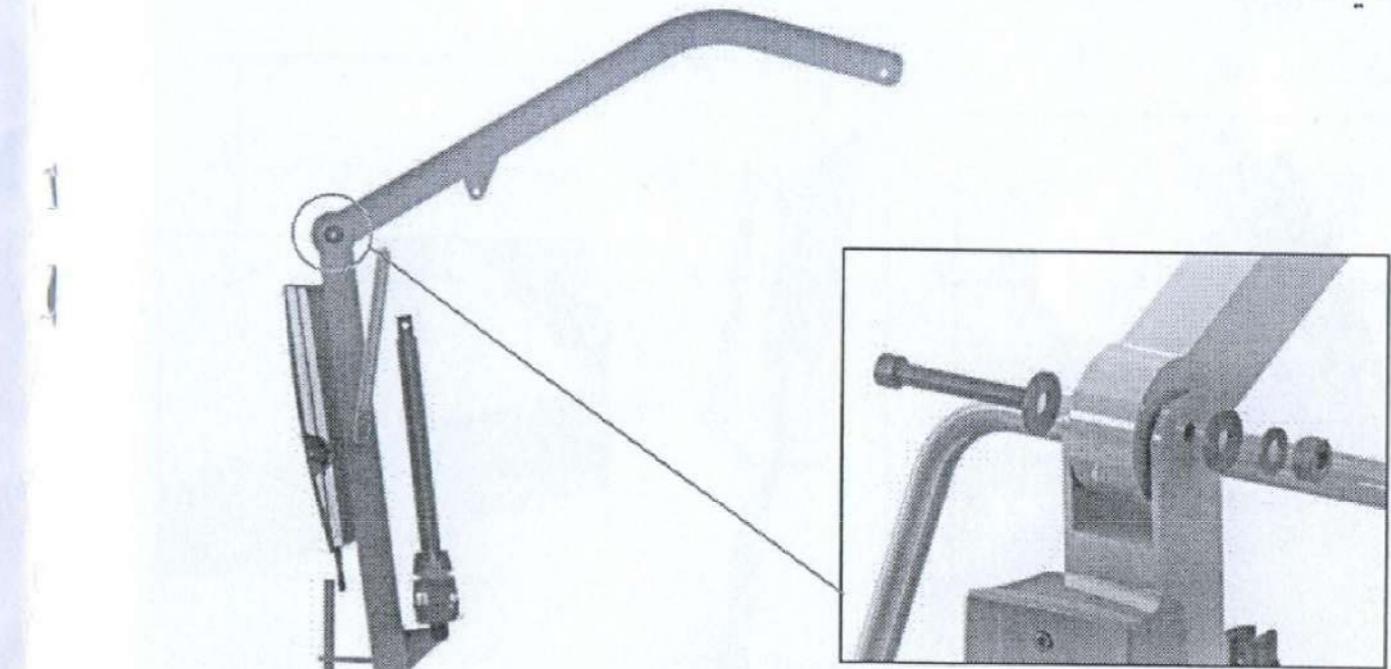

۳- بازو و جک را از محل لولا بچرخانید تا سوراخ ها در مقابل یکدیگر قرار بگیرد، و سپس واشرها و پیچ و مهره را محکم کنید.

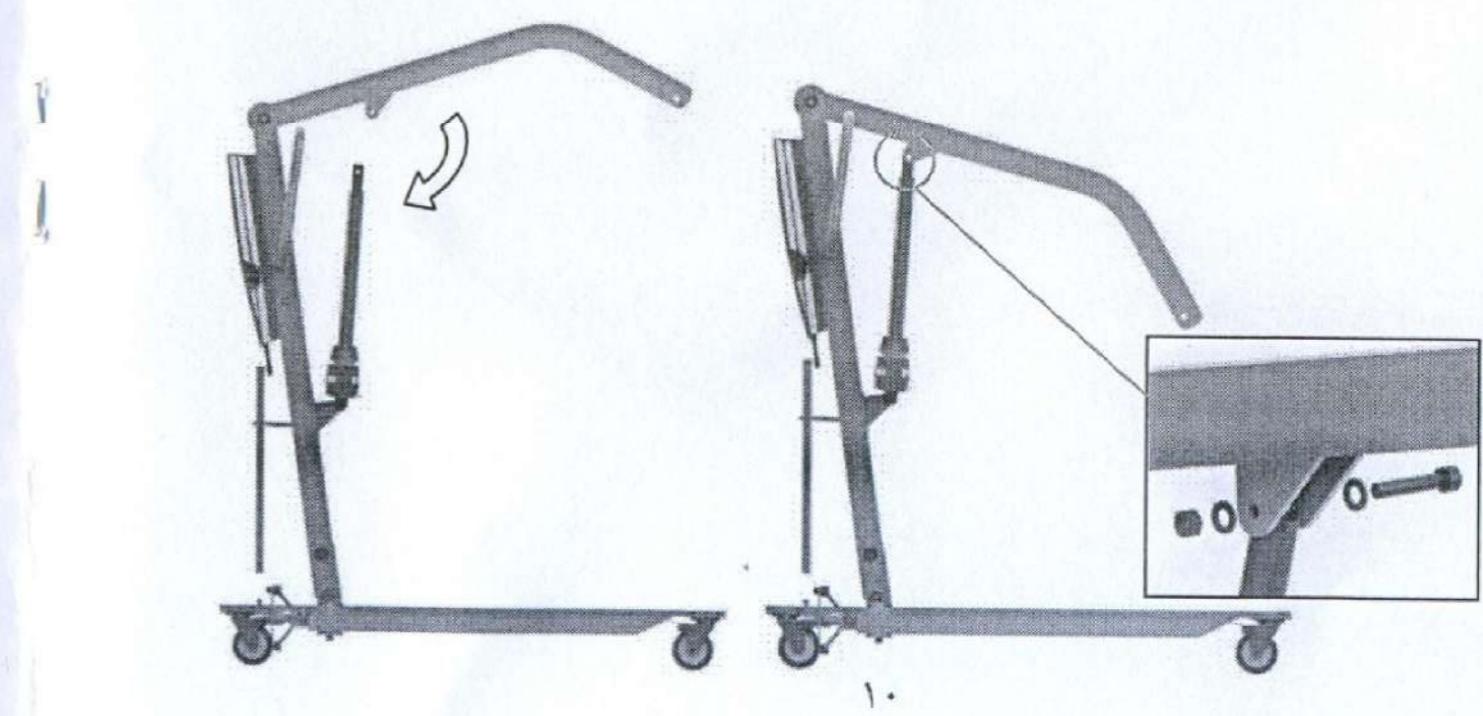

## ۶- کنترلر و باتری

### ۱- معرفی کنترل پنل



۱. دکمه بالا بردن لیفت

۲. دکمه پایین آوردن لیفت

۳. کنترل دستی

۴. دکمه بالا بردن لیفت

۵. دکمه پایین آوردن

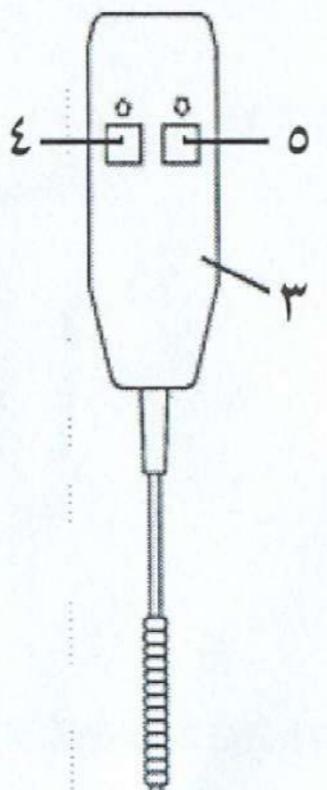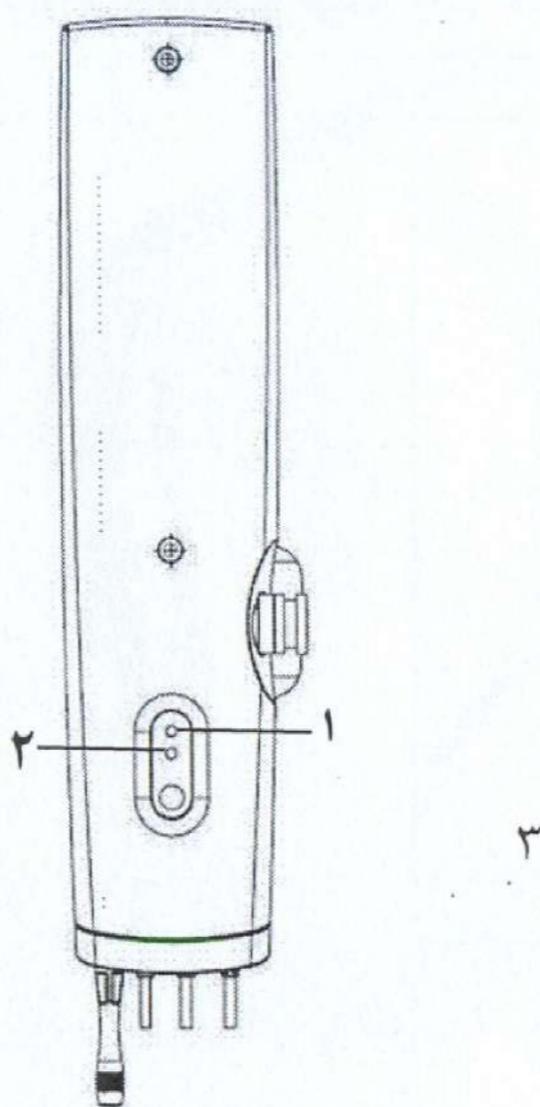

### ۲-۷- ویژگی ها :

۱. ضد آب
۲. طراحی ضد کشش برای قفل کردن دوشاخه AC
۳. حفاظت سخت افزاری و نرم افزاری در مقابل جریان برق بیش از حد
۴. حفاظت از موتور عملگر در مقابل وزن بیش از حد
۵. شروع و توقف نرم برای بالا بردن
۶. دکمه توقف اضطراری
۷. دارای نمایشگر LED برای نشان دادن ظرفیت باتری
۸. عملکرد شارژ هوشمند برای افزایش عمر باتری

### ۳-۷- توقف اضطراری:

دکمه توقف اضطراری منبع قدرت را به موتور وصل می کند و باعث می شود که موتور فو در موقع خطر متوقف شود.

### ۴-۷- طریقه استفاده از باتری:

۱. برای استفاده اولیه، باتری های جدید را به طور کامل شارژ کنید.
۲. پیشنهاد می شود که باتری ها بعد از استفاده روزانه به مدت ۸ تا ۱۴ ساعه شارژ شوند.
۳. اگر از دستگاه مداوم استفاده نمی کنید ( یک بار در هفته یا کمتر ) باتری نیاز به شارژ هفته ای به مدت ۱۲ تا ۱۴ ساعت خواهد داشت.
۴. در زمان شارژ کردن، باتری ها را بیشتر از ۲۴ ساعت شارژ نکنید.


## ۷- طریقه استفاده

یقه پوشیدن جلیقه:

ا جلیقه را پشت بیمار قرار دهید، سپس بند های جلیقه را از بین پاهای عبور دهید و س به گیره های محل آویز وصل کنید.


### طریقه قرار گیری دستگاه:

۱. بعد از باز کردن پایه های باز شو دستگاه، توسط دسته های فرمان دستگاه را در محکم مورد نظر قرار دهید.
۲. بازوی افقی را جهت راحت وصل شدن جلیقه پایین بیاورید.



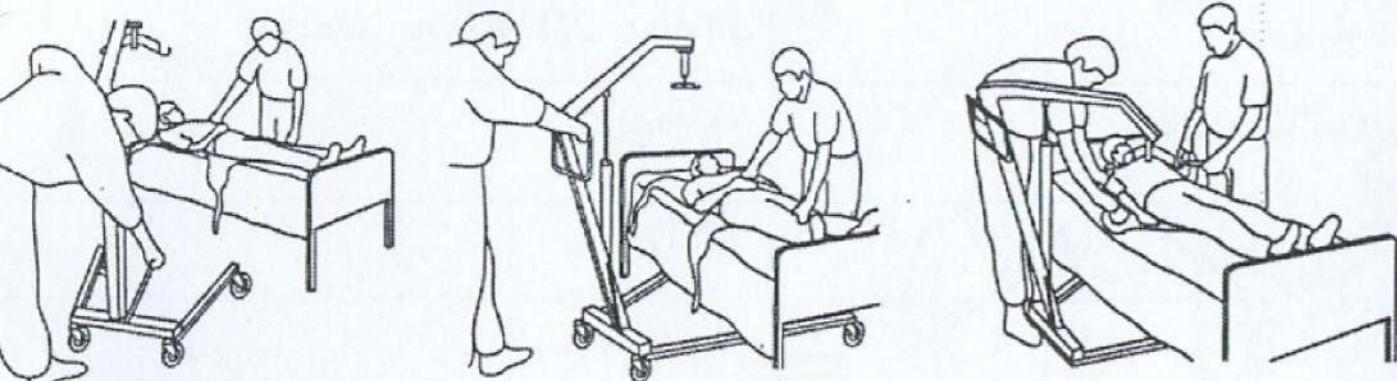


### بلند کردن بیمار:

۱. ابتدا دکمه بالا بر روی کنترل دستی را فشار دهید تا بیمار هم سطح تخت قر بگیرد. وزن بیمار کاملا روی لیفت قرار خواهد گرفت.

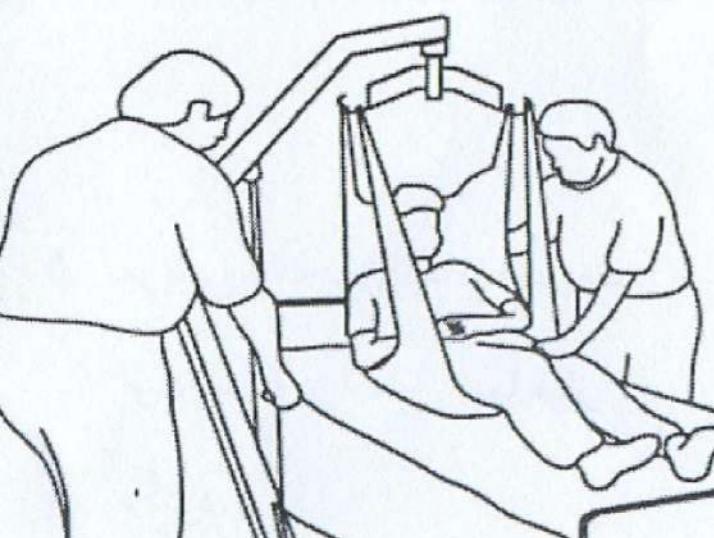

۲. دست های بیمار را داخل جلیقه قرار دهید.

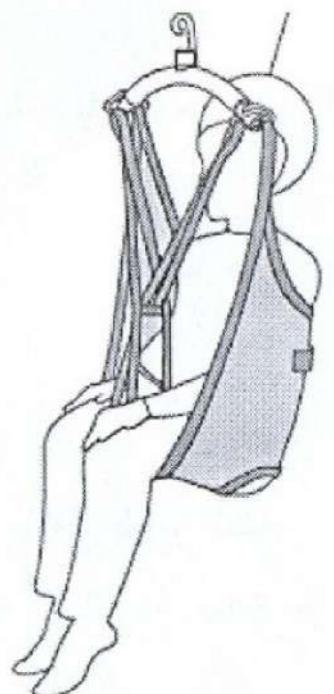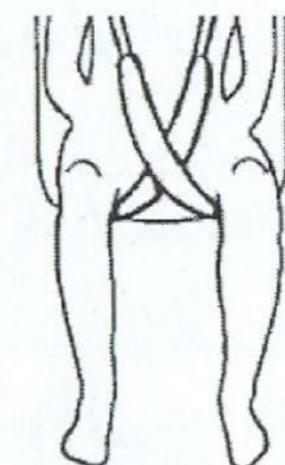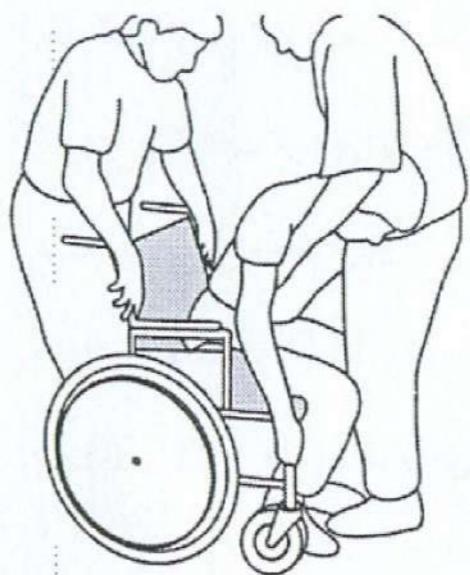


## -۸- مشخصات


مشخصات فنی	
۲۲۰ ولت AC ۵۰ هرتز	ولتاژ ورودی
۲۴ ولت DC	ولتاژ خروجی
۲۴ ولت DC ۵ آمپر ساعت	باطری
۱۰ آمپر	حداکثر جریان
۰.۴۲ وات	صرف برق
پنل و هندست	کنترل
قطع عملیات	هشدار اضافه بار
نمایش در LED	وضعیت باطری
۵ تا ۴۰ درجه سانتی گراد	دماي استفاده
۲۰-تا ۶۰ درجه	دماي منبع



۳. وقتی که بیمار کاملا روی تخت قرار گرفت پاهای بیمار را به شکل زیر قرار دهید.

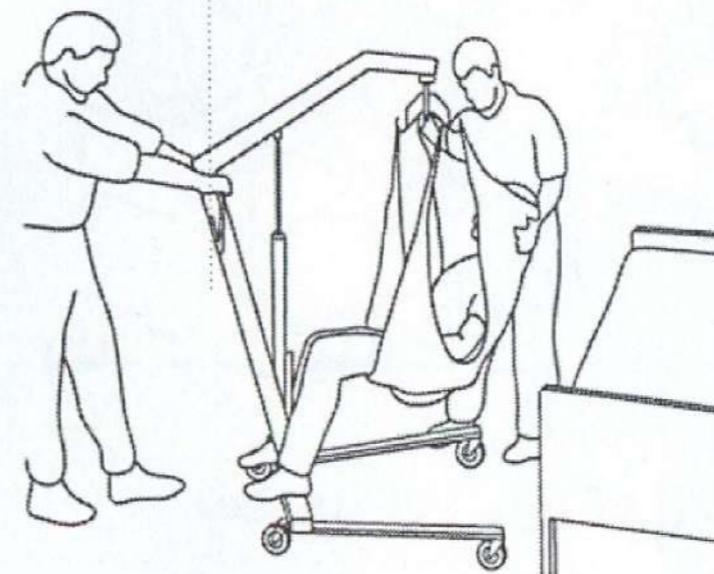

۴. با استفاده از دسته‌ی لیفت بیمار را از تخت خارج کنید.

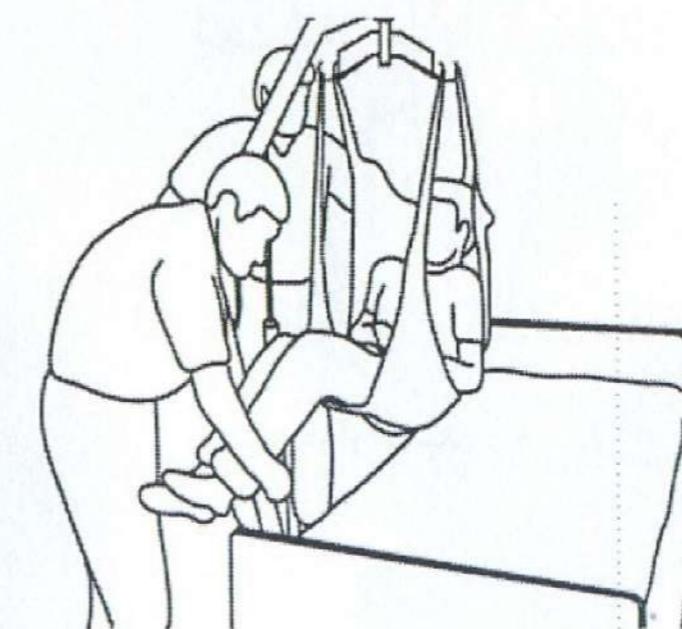

۵. مریض را بچرخانید تا صورت او درست در مقابل شما قرار بگیرد.



سعی مابر این است که در سراسر کشور بتوانیم به هموطنان عزیز خدمت رسانی کنیم و در آینده‌ای نزدیک برای کشورهای همسایه نیز خدمات ارانه نماییم. مهمترین دارایی شرکت گوش، اعتماد مشتریان می‌باشد که همواره می‌کوشیم این اعتماد را روز به روز افزایش دهیم. تلاش تمامی پرسنل گوش در جهت افزایش کیفیت و رضایت مندی مشتریان عزیز می‌باشد و ما با تمام توان در کنار شما هستیم تا نیازهای شما را بشنویم و در جهت رفع آنها اقدام کنیم.

مشهد، بلوار معلم  
بین معلم ۱۲ و ۱۴ پلاک ۲۹۰

۰۹۱۲-۰۸۴۲۶۵۳



kooshagroups.ir



@kooshagroups

